

NOTICE D'UTILISATION DU COMBI-STOPCHUTE

COMBIST2

A lire avant chaque utilisation

Ce produit est une solution préventive de chutes et de maintien doux pour le confort du patient couché. La combinaison permet :

- La prévention des chutes nocturnes.
- Un couchage dans toutes les positions.
- De conserver ses changes.

S'il est mal utilisé ce produit peut présenter des risques de danger pour le patient. Demander conseil à votre revendeur.

La décision d'utiliser la combinaison revient à l'équipe pluridisciplinaire de soins qui doit considérer ce produit comme une aide pour la sécurité et le confort du patient. Ce produit est assimilable à de la contention.

Une prescription médicale devra être rédigée. Son utilisation est indiquée pour le confort et le maintien au lit du patient et doit faire l'objet d'une surveillance validée par l'ensemble de l'équipe soignante. Pour juger de l'acceptation du produit par le patient, Il est impératif de tester la combinaison sur le patient avant de décider de son utilisation.

Contre indication: Ne pas utiliser ce produit pour des patients agités avec des pathologies de sénilité et de démence qui pourraient tenter de s'échapper de la combinaison. (Unité Alzheimer, Psychiatrie). En tentant de s'échapper les patients pourraient se mettre en danger.

Ne pas utiliser ce produit à domicile car ni le lit ni la surveillance n'y sont appropriés.

Les règles strictes énoncées ci-dessous dans l'installation sont à respectées et la notice d'utilisation est à lire attentivement avant chaque utilisation:

- La pose des barrières du lit médical **complètes ou ¾** est obligatoire car elles constituent une sécurité supplémentaire.
- Les demi-barrières sont interdites car un patient agité pourrait tenter de s'enfuir de son lit et se mettre en danger avec des demi-barrières.
- La pose de protection de barrières de lit est obligatoire afin d'éviter qu'un patient se blesse à travers les barreaux du lit.
- Le lit doit être mis en position la plus basse possible car c'est une sécurité supplémentaire. La télécommande du lit médical doit être inaccessible au patient.
- S'il y a des coutures déchirées après utilisation chez un patient, il faut arrêter l'utilisation du produit chez ce patient, cela signifie que le produit n'est pas accepté par le patient. (Retour SAV impératif chez votre revendeur).

Le Combi-Stop Chute n'est pas un dispositif médical.

Le fabricant de ce produit ne pourra pas être tenue responsable ni de la mauvaise utilisation de la combinaison ni de la mauvaise surveillance autour du produit ni du mauvais fonctionnement du lit et de ses accessoires. Demander conseil à votre revendeur.

Notice : mise à jour 12 2017

COMBI STOPCHUTE

Mise en place et consignes d'installation à respecter

1-Mettre le lit médical en position haute pour faciliter le travail d'installation et notamment l'accès aux sangles.

2-La Combinaison STOPCHUTE se pose ZIP fermé sur le matelas comme un drap housse en veillant à bien emboîter les 4 coins du matelas dans les 4 coins de la combinaison.

Vérifier l'état des coutures, s'il y a des coutures déchirées, il ne faut pas utiliser la combinaison. (Il faut la retourner au SAV du fabricant par l'intermédiaire de votre revendeur).


3-Fixer les sangles de fixation en dessous **du cadre du lit** suivant le schéma ci-dessous:

3 sangles horizontales avec boucles fixées au-dessous du matelas **sous le cadre du sommier du lit.**

2 sangles avec boucle au pied du lit sont attachées au cadre du sommier

Vue de dessous

Tête

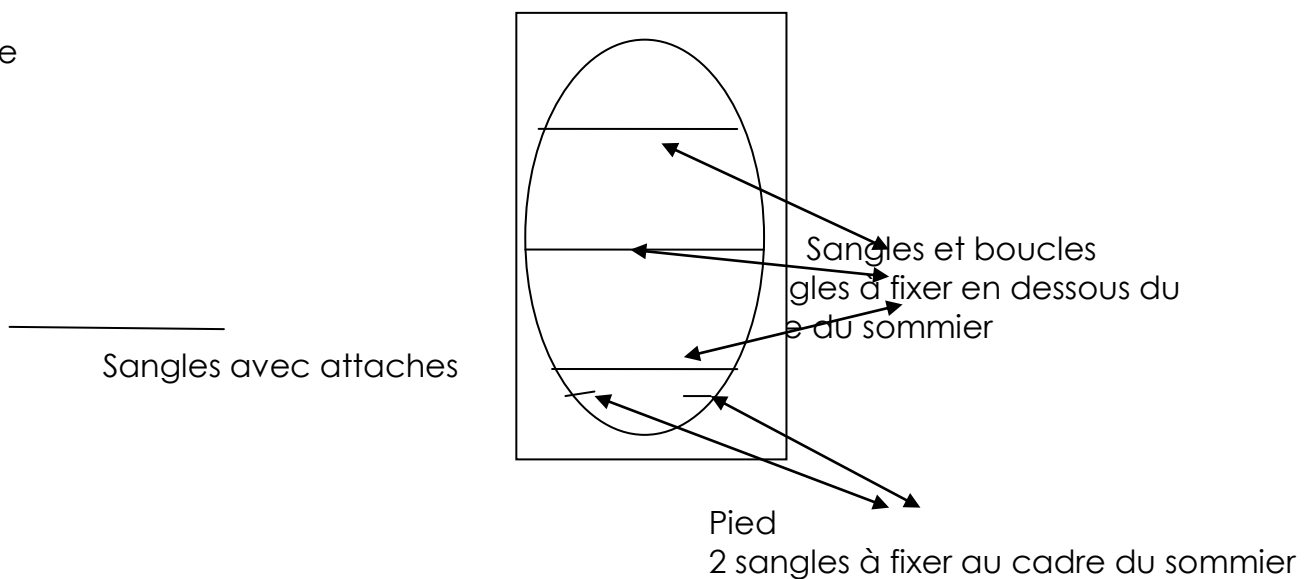

4-Par sécurité remettre le lit médical en position hauteur du sommier la plus basse

5-Ouvrir le ZIP avant d'installer le patient

6-Installer le patient, fermer le ZIP jusqu'au bas de la housse

7-Installer les barrières complètes ou barrières $\frac{3}{4}$ et les protections de barrière de lit. Bien vérifier que les barrières sont bien enclenchées et en bon état de fonctionnement.

Entretien :

Le ZIP et les sangles doivent être fermés pendant le lavage.

Lavage en machine à 60°C avec les détergents habituels.

Séchage classique en machine à 60°C.

Après chaque utilisation bien vérifier l'état des coutures et des sangles. S'il y a des coutures déchirées ne pas utiliser le produit et contacter votre revendeur pour retour SAV.

Notice disponible chez votre revendeur

Demander conseil à votre revendeur (mise à jour Décembre 2017)